

POLOHOVACÍ POSTEL ELEKTRICKÁ

NÁVOD K POUŽITÍ



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ▤ Nepřekračujte nosnost (max. cca 135 - 140 kg).
- ▤ U lůžka nepoužívejte otevřený oheň, používejte pouze v suchých místnostech.
- ▤ Používejte doporučené matrace.
- ▤ Matraci chraňte nepromokavým prostěradlem. Poškozené ihned vyměňte.
- ▤ Pravidelně kontrolujte všechny části lůžka.
- ▤ Nenechávejte postel u zdrojů tepla a dlouho na slunci.

POUŽÍVÁNÍ POLOHOVACÍ POSTELE

NASTAVENÍ

- ▤ Postel postavte na rovnou podlahu, aby se všechna 4 kola dotýkala země.
- ▤ Zapojte do zásuvky VDE (220V/230V, 50 Hz).
- ▤ Zástrčku vytahujte držením za tělo, ne za kabel.
- ▤ Před použitím vždy zabrzděte všechna 4 kola.
- ▤ Nohy a hlavu zvedejte jen, když uživatel leží na posteli.



RIZIKO ÚRAZU

- ✚ Při manipulaci s uživatelem na posteli, jeho vstávání nebo uléhání vždy zabrzděte kola.
- ✚ Bočnice nastavujte podle potřeby uživatele. Odblokovat bezpečně je lze pouze z venkovní strany lůžka obsluhující osobou.
- ✚ **O bočnice se neopírejte silou, mohly by se zlomit.**
- ✚ **Dávejte pozor na končetiny mezi pohyblivými částmi (zádový/nožní díl, zvedák, bočnice).**
- ✚ Při nastavování opory nohou/hlavy nedávejte ruce mezi matraci a pohyblivé části.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- ✚ Dřevo: Čistěte měkkou utěrkou namočenou v teplé vodě s jemnými čisticími prostředky na nábytek. Nepoužívejte agresivní čističe ani tvrdé kartáče.
- ✚ Kov: Chromované části čistěte suchým hadříkem, opotřeбенé plochy ošetřete speciálními prostředky na chrom.
- ✚ Postel vračejte v původním, čistém stavu.



- ✚ **NIKDY POSTEL SAMI NEOPRAVUJTE ANI NEROZEBÍREJTE!**
- ✚ V případě jakýchkoliv nejasností či potíží kontaktujte odpovědného pracovníka půjčovny.
- ✚ Při zjištění poškození (bočnic, jiné závady) postel nepoužívejte a kontaktujte odpovědného pracovníka půjčovny.
- ✚ Neotevírejte kryty motorů a elektrických částí.
- ✚ Kontroly a opravy smí provádět jen vyškolené osoby. Tyto kontroly provádíme průběžně po každém vrácení zapůjčeného lůžka, bezpečnostně technické kontroly jedenkrát ročně (**bude Vás kontaktovat pracovník servisu kvůli zajištění BTK**).



KONTAKTNÍ OSOBA:



Mgr. Marcela Kutláková



599 508 533



731 625 768



pujcovna@ostrava.charita.cz



<https://hospicova.poradna.ostrava.charita.cz/>

